

FABRIQUÉ SANS PRODUIT TOXIQUE

Notre mission:

vous proposer les solutions
les plus écoresponsables

ECO-PILL^{MD}




 **EcoloPharm.com**
Le changement passe par vous



ECO-PILL

GUIDE D'UTILISATION

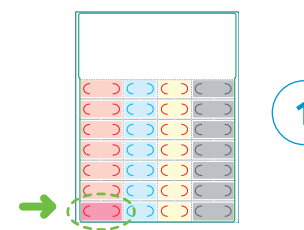

1

DÉBUTER LA PRISE DE MÉDICAMENTS :

Suivre l'exemple sur l'image de gauche.



2

DÉTACHER UNE JOURNÉE :

Positionner le pouce sur le rebord de l'alvéole. Tirer la rangée désirée vers le haut.



3

DÉTACHER UNE DOSE :

Pivoter l'alvéole d'un demi-tour et tirer.



4

OUVRIRE UNE DOSE :

Exercer une légère pression sur les pointillés pré-perforés afin de percer l'alvéole.



5

PRENDRE LE MÉDICAMENT :

Tirer la feuille vers le haut et les médicaments seront accessibles.

Ce produit n'est pas sécurisé pour les enfants.
Toujours garder hors de la vue et de la portée des enfants.

